

code laetus aligné à droite (22 mm maxi)
(123) code laetus en clair OCRB (AV-100) corps 6 pts
code laetus aligné à droite (22 mm maxi)
code article en noir OCRB corps 6 pts (AV-100)

Sens de lecture du code ←
Sens de lecture du code →

21,75 mm
429680

Systane®

ULTRA UD

BENETZUNGSTROPFEN FÜR DIE AUGEN
UNKONSERVIERTE EINZELDOSEN

1328

1328

1328

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um sie später noch einmal nachlesen zu können.

BESCHREIBUNG:
Bei **SYSTANE® ULTRA UD** handelt es sich um eine sterile Lösung mit folgenden Inhaltsstoffen: Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, Sorbitol, Aminomethylpropanol, Borsäure, Kaliumchlorid und Natriumchlorid.

ANWENDUNGSGEBIETE
SYSTANE ULTRA UD sind Benetzungstropfen zur Therapie Trockener Augen.
SYSTANE ULTRA UD lindert die Symptome des Trockenen Auges wie Brennen und Irritationen. Die praktischen Einzeldosen sind unkonserviert und eignen sich besonders für Patienten mit empfindlichen Augen.

GEGENANZEIGEN (Gründe gegen eine Anwendung):
Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von **SYSTANE® ULTRA UD** sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.

ANWENDUNGSHINWEISE:
SYSTANE® ULTRA UD kann täglich nach Bedarf angewendet werden.
SYSTANE® ULTRA UD kann vor und nach dem Tragen von Kontaktlinsen angewendet werden, um die Augen zu befeuchten.

Drehen Sie den Verschluss der Einzeldosen ab, geben Sie einen Tropfen ins Auge und blinzeln Sie. Verwerfen Sie das Behältnis nach Gebrauch.

WARNHINWEISE:
Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers und die Verpackungshinweise zur korrekten Anwendung des Produktes beachten. Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, suchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie jedes Berühren der Tropferspitze des Einzeldosisbehältnisses oder deren Kontakt mit Gegenständen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Vor dem auf Packung und Flasche angegebenen Verfalldatum verwenden.
- Einzeldosisbehältnis nach einmaliger Anwendung verwerfen
- Restmengen der Augentropfen nicht wiederverwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

PACKUNGSGRÖSSEN:
SYSTANE® ULTRA UD Benetzungstropfen für die Augen sind als Packungen in Einzeldosisbehältnissen zu je 30 x 0,7 ml erhältlich.

STERILE	A
---------	---

VERTRIEB für Deutschland
Alcon Pharma GmbH
Blankreutestraße 1
79108 Freiburg

HERSTELLER:
Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

EU-BEVOLLMÄCHTIGTER:
Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Boundary Way
Hemel Hempstead
Hertfordshire
HP2 7UD Vereinigtes Königreich

US-Patent-Nrn. 6 403 609, 6 583 124, 6 838 449 und Europäische-Patent-Nr. 0999825 und 1348427

0123

© 2010 Alcon, Inc.

135 mm
174 mm

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

APPROVAL

The undersigned :

.....
name

.....
vorname

confirms that this proof contains an accurate translation of the English Corporate Standard text, and is in compliance with the registered information and the legal rules.

Please also carefully check :

- local barcodes if any
- formula
- components if mentioned
- shelflife if mentioned
- storage conditions
- trademarks

This proof is approved :

as is

conditionally

Customer request :

new proof

Signature and date :

.....
Name *Date*

SYSTANE ULTRA 5D ALLEMAGNE	429680	Insert 135 x 174 mm Chalvet ou Tonnellier	
/ia	Alcon®	2° proof 21/06/2010	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 8px;"> ■ 1/1 NOIR ■ DECOUPE ■ COTES KB </div> <p style="text-align: center; font-size: 8px;">RECTO UNIQUEMENT Type machine : MONO 1</p>			

PACKAGING APPROVAL

NA

.....
Name *Date*